

ANABOX® TAGESBOX COMPACT

Medizinprodukt
der Klasse I

Version:
07/2017

Gebrauchsanweisung

Die Medikamentenbox für einen Tag.



Bild 1: Bequemes Öffnen des Tagesdosierers durch Verschieben des Deckels nach rechts (morgens bis abends) oder links (nachts).




Bild 2: Einfaches Entfernen des Deckels durch eine leichte Drehbewegung im geöffneten Zustand.



Bild 3: Leichtes Aufbringen des Deckels durch Aufklicken.

Medikamentenbox vor Kindern sicher aufbewahren und fern halten!

- Bitte waschen oder spülen Sie die Tagesdosierer vor dem Erstgebrauch aus! Unsere Empfehlung: Die einzelnen Teile mit lauwarmen Wasser und einem milden, für die Reinigung von Geschirr in privaten Haushalten zugelassenen Reinigungs- bzw. Spülmittel säubern. Sie können auch die Spülmaschine (Regeltemperatur 50°C) nutzen, da der Dosierer für Spülmaschinen geeignet ist.
- Wir empfehlen Ihnen, die Dosierer ebenfalls vor der Neubestückung mit Medikamenten oder bei eintretenden Medikationsänderungen zu reinigen!
- Bitte berücksichtigen Sie gegebenenfalls besondere Lagerungsbedingungen von Medikamenten, wie z. B. Licht- und Temperaturempfindlichkeit laut Beipackzettel der jeweiligen Verpackung. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Apotheker oder die Herstellerfirma des Medikaments.
- Für die unkorrekte Benutzung der **ANABOX®** oder die unkorrekte Einnahme von Medikamenten übernehmen wir keinerlei Haftung!
- Die Benutzung der Medikamentenbox durch Personen mit geistigen Behinderungen sollte unter fachkundiger Aufsicht erfolgen.

 **anmed GmbH**
Gartenstraße 13
D-09456 Annaberg-Buchholz
Tel. +49 (0) 3733 596300
Fax +49 (0) 3733 596301
Mail: info@anmed.de
Web: www.anabox.de



Made in Germany


DIE APOTHEKENMARKE

Vertrieb durch:
WEPA Apothekenbedarf
GmbH & Co KG, 56204 Hillscheid
www.wepa-dieapothekenmarke.de

