

Medikamentenbox für eine Woche.

Medikamentenbox vor Kindern sicher
aufbewahren und fern halten!



Bequem zu Öffnen –
Komplette Box in der
Hand halten ...

... und mit dem Zeigefinger
der anderen Hand einen
sanften Druck auf den
Deckel ausüben.

Dies erleichtert das
Öffnen des Deckels mit
Hilfe des Daumens.

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch unsere nützlichen Tipps und Hinweise!

- Vor Erstgebrauch bitte den Dosierer auswaschen/
ausspülen! Empfehlung - bitte die Box mit lauwarmem
Wasser und einem milden, für die Reinigung von
Geschirr in privaten Haushalten zugelassenem Reini-
gungs- bzw. Spülmittel säubern. Man kann aber auch
die Spülmaschine (Regeltemperatur 70 °C) nutzen, da
der Dosierer spülmaschinenfest ist.
- Empfohlen wird die Reinigung ebenfalls vor Neube-
stückung des Dosierers mit Medikamenten oder bei
eintretenden Medikationsänderungen!
- Beachten Sie bitte auch eventuelle besondere
Lagerungsbedingungen von Medikamenten wie z. B.
Lichtempfindlichkeit und Temperatur laut Beipackzettel
der jeweiligen Verpackung. Bei Unklarheiten fragen
Sie bitte Ihren Apotheker oder die Herstellerfirma des
Medikaments. Für die unkorrekte Benutzung der
ANABOX® oder die unkorrekte Einnahme von Medika-
menten übernehmen wir keinerlei Haftung!
- Die Benutzung der Medikamentenbox durch Personen
mit geistigen Behinderungen sollte unter fachkundiger
Aufsicht erfolgen.



anmed GmbH

Gartenstraße 13

D-09456 Annaberg-Buchholz

Tel. +49 (0) 3733 596300

Fax +49 (0) 3733 596301

Mail: info@anmed.de

Web: www.anabox.de

Made in Germany



DIE APOTHEKENMARKE

Vertrieb durch:

WEPA Apothekenbedarf

GmbH & Co KG

56204 Hilscheid

www.wepa-dieapothekenmarke.de