

# ANABOX® TAGESBOX

Medizinprodukt  
der Klasse I

Version:  
26.03.2013

## Gebrauchsanweisung

### Medikamentenbox vor Kindern sicher aufbewahren und fernhalten!



Bequemes Öffnen der Box durch Verschieben des Deckels nach rechts (Einnahmezeiten) oder links (Bedarf)



Einfaches Entfernen des Deckels durch Abklicken



Leichtes Aufbringen des Deckels durch Aufklicken

#### Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch unsere nützlichen Tipps und Hinweise!

- Vor Erstgebrauch bitte den Tagesdosierer auswaschen/ ausspülen! Empfehlung – bitte die Teile mit lauwarmem Wasser und einem milden, für die Reinigung von Geschirr in privaten Haushalten zugelassenem Reinigungs- bzw. Spülmittel säubern. Man kann aber auch die Spülmaschine (Regeltemperatur 70 °C) nutzen, da der Dosierer spülmaschinenfest ist.
- Empfohlen wird die Reinigung ebenfalls vor Neubestückung des Dosierers mit Medikamenten oder bei eintretenden Medikationsänderungen!
- Beachten Sie bitte auch eventuelle besondere Lagerungsbedingungen von Medikamenten wie z. B. Lichtempfindlichkeit und Temperatur laut Beipackzettel der jeweiligen Verpackung. Bei Unklarheiten fragen Sie bitte Ihren Apotheker oder die Herstellerfirma des Medikaments. Für die unkorrekte Benutzung der ANABOX® oder die unkorrekte Einnahme von Medikamenten übernehmen wir keinerlei Haftung!
- Die Benutzung der Medikamentenbox durch Personen mit geistigen Behinderungen sollte unter fachkundiger Aufsicht erfolgen.



**anmed GmbH**  
Gartenstraße 13  
D-09456 Annaberg-Buchholz  
Tel.: +49(0)3733 596300  
Fax: +49(0)3733 596301  
E-Mail: [anmed@t-online.de](mailto:anmed@t-online.de)  
[www.anabox.info](http://www.anabox.info)

Made in Germany



Vertrieb durch:  
WEPA Apothekenbedarf  
GmbH & Co KG, 56204 Hillscheid  
[www.wepa-dieapothekenmarke.de](http://www.wepa-dieapothekenmarke.de)

