

Medikamentenbox mit 3 Einnahmefächern

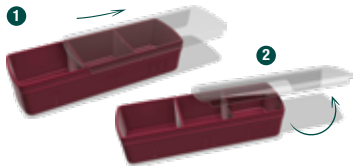


Bild 1:
Schieben Sie den Deckel
nach rechts.

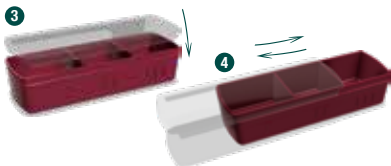


Bild 2:
Entfernen Sie den Deckel
durch eine leichte
Drehbewegung.



Bild 3:
Nach der Befüllung klicken
Sie den Deckel in der
richtigen Position auf das
Unterteil.

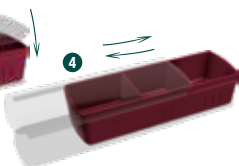


Bild 4:
Um das Fach „III“ auf der rechten
Seite des Dosierers zu öffnen,
schieben Sie den Deckel nach
links.



Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch unsere nützlichen Tipps und Hinweise:

- Vor Erstgebrauch bitte die einzelnen Dosierer auswaschen/ausspülen! Empfehlung - bitte die Teile mit lauwarmem Wasser und einem milden, für die Reinigung von Geschirr in privaten Haushalten zugelassenem Reinigungs- bzw. Spülmittel säubern. Man kann aber auch die Spülmaschine (Regeltemperatur 50°C) nutzen, da der Dosierer spülmaschinenfest ist.
 - Empfohlen wird die Reinigung ebenfalls vor Neubestückung der Dosierer mit Medikamenten oder bei eintretenden Medikationsänderungen.
 - Bitte bei der Einnahme auf die richtige Reihenfolge der Tage achten.
 - Beachten Sie bitte auch eventuelle besondere Lagerungsbedingungen von Medikamenten wie z. B. Lichtempfindlichkeit und Temperatur laut Beipackzettel der jeweiligen Verpackung. Bei Unklarheiten fragen Sie bitte Ihren Apotheker oder die Herstellerfirma des Medikaments. Für die unkorrekte Benutzung der **ANABOX®** oder die unkorrekte Einnahme von Medikamenten übernehmen wir keinerlei Haftung!
 - Die Benutzung der Medikamentenbox durch Personen mit geistigen Behinderungen sollte unter fachkundiger Aufsicht erfolgen.
 - Medikamentenbox vor Kindern sicher aufbewahren und fern halten!
 - Ausgehend von dem auf der Rückseite aufgebrachten Produktionsdatum (Produktionsuhren – Jahr/Monat), ist das Produkt bei sachgerechtem Gebrauch, ordnungsgemäßer Lagerung und Reinigung 5 Jahre zu verwenden.
-



anmed GmbH

Gerichtsstr. 140, 09474 Crottendorf

Tel. +49 (0) 37344 763800

Mail: info@anmed.de

Web: www.anabox.de



Vertrieb durch: WEPA Apothekenbedarf
GmbH & Co KG, D-56204 Hillescheid
www.wepa-dieapothekenmarke.de